

CÓMO USAR

# Bolin Chest Seal

VENDAJE PARA PECHO SELLADO  
CON VÁLVULA BOLIN H&H




Limpie y seque el lugar de la aplicación con una almohadilla o esponja absorbente (no incluidos) para retirar cualquier fluido previo a la aplicación.



Abra el empaque tirando de una de las pestañas indicadas en el paquete y retire el producto. Tome el producto por la pestaña grande para mantenerlo estéril y siga estas instrucciones para su aplicación.


**1**

Utilizando la almohadilla incluida, limpie cualquier fluido corporal de la herida del pecho. Sosteniendo el producto desde la pestaña grande, separe el respaldo de plástico transparente de la base pegajosa de hidrogel.

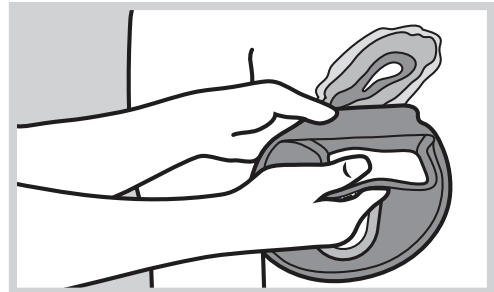

**2**

Mantenga el Sello para Pecho Bolin sobre la herida y colóquelo sobre el pecho, centrando las tres válvulas sobre el área de la herida. El aire empezará a salir a través de las válvulas unidireccionales. Presione el sello hacia abajo sobre el pecho para asegurar un sella total.

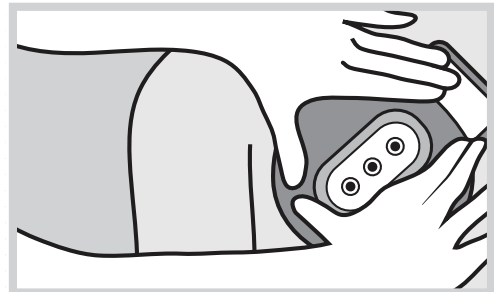

Si una de las válvulas se llegara a bloquear, levante el Sello para Pecho Bolin y vuélvalo a colocar para que una de las otras válvulas esté centrada sobre la herida.



Continúe vigilando a la persona lesionada por signos de tensión neumotorácica. Siga los protocolos locales para el tratamiento de tensión neumotorácica cuando use el Sello para Pecho Bolin.



**ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA UN USO. NO REUTILIZAR.**

*Este producto es un dispositivo médico que pudiera requerir entrenamiento especial con relación a su uso apropiado. Por favor siga cualquier norma local o autoridad gubernamental con relación al uso de este dispositivo.*