

CÓMO USAR EL PAQUETE DOBLE DE SELLO PARA PECHO DUAL



Dual Seal™




Limpie y seque el lugar de la aplicación con una almohadilla o esponja absorbente (no incluidos) para retirar cualquier fluido previo a la aplicación.



Inspeccione la bolsa de aluminio para asegurarse de que el paquete no haya sido violado. Abra el paquete utilizando una de las pestañas para tirar y retire el producto (2 sellos incluidos).


1

Retire el sello del respaldo protector y aplíquelo a la herida con un adhesivo de hidrogel aplicado contra la herida y la piel.

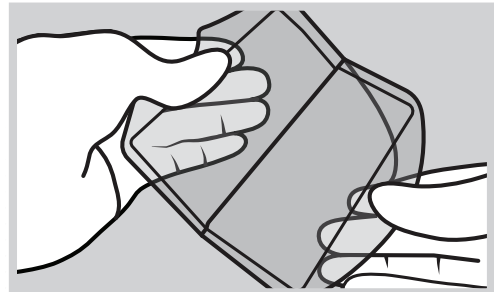

2

Sobre el sello sobre la herida y aplique presión para formar un sello protector alrededor del sitio de la herida. Vigile el área de la herida hasta que sea revisada por profesionales médicos.

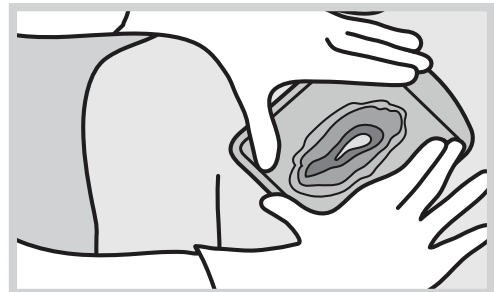

ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA UN USO. NO REUTILIZAR.

Este producto es un dispositivo médico que pudiera requerir entrenamiento especial con relación a su uso apropiado. Por favor siga cualquier norma local o autoridad gubernamental con relación al uso de este dispositivo.