

CÓMO USAR EL H&H


Mini Vendaje De Compresión



Abra el empaque tirando de una de las pestañas indicadas en el paquete y retire el producto. Tome el producto por el elástico para mantener estéril el lado de la almohadilla. Luego siga estas instrucciones para su aplicación.

1

Aplique el vendaje con la almohadilla estéril hacia abajo sobre la herida y el lado de la banda elástica hacia arriba. Tome la banda elástica y tire alrededor del vendaje, así asegurando el extremo corto elástico contra la banda.

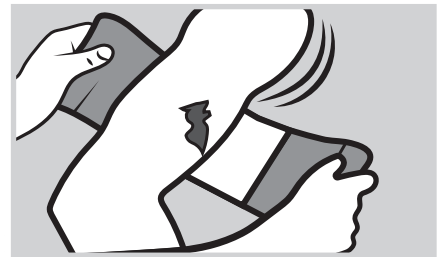


2

Una vez que el vendaje esté seguro, empiece a envolver el elástico alrededor de la herida, manteniendo la tensión en el elástico. Esto añadirá presión alrededor de la herida y ayudará a reducir el sangrado. Continúe envolviendo el elástico hasta que llegue al final.



3

Una vez que termine de envolver todo el elástico, asegure el extremo final de la banda con el gancho para envolverlo o usar el pasador para asegurar el extremo a la banda.

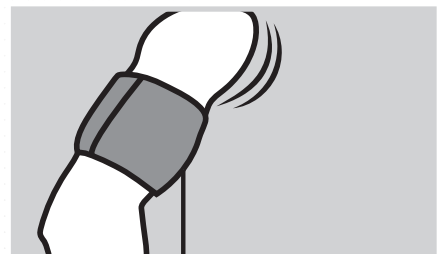

ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA UN USO. NO REUTILIZAR.

Este producto es un dispositivo médico que pudiera requerir entrenamiento especial con relación a su uso apropiado. Por favor siga cualquier norma local o autoridad gubernamental con relación al uso de este dispositivo.