

CÓMO USAR EL

SWAT-T™


STRETCH, WRAP AND TUCK TORNIQUETE



Abra el empaque del torniquete ya sea tirando de las pestañas para abrir el paquete o tomando los extremos del paquete y torciendo el producto, creando así un rompimiento en el medio. Retire el producto del paquete y fije a un lado la banda de aplicación del torniquete.


1

Envuelva el SWAT-T por encima del área de la herida (o sobre el área de la herida si está siendo usado como tela para compresión). Envuelva una vez alrededor de la extremidad para asegurar que el torniquete está seguro contra la piel.

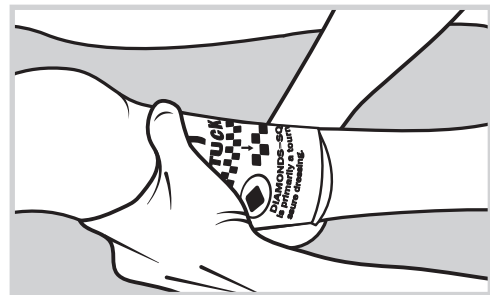

2

Tire fuerte del SWAT-T contra la extremidad hasta que las gráficas de diamantes en el torniquete se transformen en cuadros. Esto mostrará que se ha aplicado la suficiente fuerza para detener el sangrado severo.

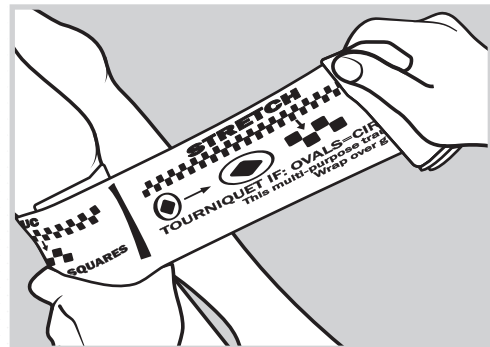


3

Continúe envolviendo el SWAT-T alrededor de la extremidad, manteniendo la compresión al jalar de forma continua el torniquete mientras sigue envolviendo.

4

Justo antes del final del torniquete, mantengan la última envoltura para crear un círculo para atascar el final del torniquete bajo este mismo círculo. El SWAT-T se atascará en sí mismo y permanecerá en su lugar. Revise frecuentemente que el torniquete siga apretado para una oclusión continua, pues pudiera suceder que se afloje después de su aplicación.

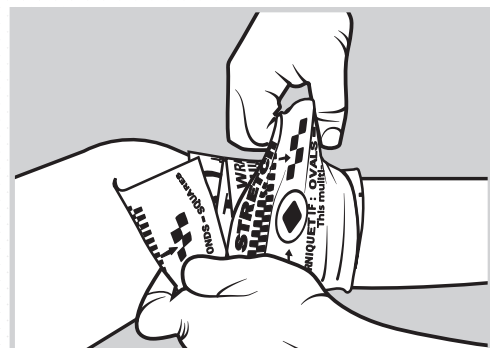

ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA UN USO. NO REUTILIZAR.

Este producto es un dispositivo médico que pudiera requerir entrenamiento especial con relación a su uso apropiado. Por favor siga cualquier norma local o autoridad gubernamental con relación al uso de este dispositivo.