

CÓMO USAR EL

TK-4

TORNIQUETE DE BANDA DE COMPRESIÓN



Abra el empaque tirando de una de las pestañas indicadas en el paquete para retirar el producto. Tome el producto de uno de los ganchos S. Luego siga estas instrucciones para la aplicación.

1

Coloque el TK-4 por el extremo del gancho sobre la extremidad asegurada por encima del área lesionada. Coloque la banda sobre la extremidad con el gancho al exterior de la extremidad.

2

Envuelva la banda elástica bajo la extremidad y engánchela a través del gancho S en la extremidad. Asegúrese de que el elástico esté seguro dentro del gancho. Empiece a tirar de la banda y mantenga una tensión constante en el elástico.

3

Mientras mantiene el TK-4 contra la extremidad, tire y apriete la banda hacia abajo para asegurar el TK-4 e inicie la compresión contra la extremidad. Siga apretando contra la banda y empiece a envolverla alrededor de la extremidad, mientras continúa tirando fuertemente de la banda mientras envuelve. **NO** suelte la banda mientras esté envolviendo; esto causará que el gancho y la banda se desenreden y pudieran causar una lesión.

4

Una vez que el torniquete haya sido envuelto alrededor de la extremidad, atore el resto del gancho S bajo la banda elástica para asegurar el torniquete. Si usted necesita ajustar el torniquete, tire del gancho S y desenvuelva la banda.



Revise frecuentemente que el torniquete siga apretado para una oclusión continua, ya que pudiera suceder que se afloje después de su aplicación.



ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA UN USO. NO REUTILIZAR.

Este producto es un dispositivo médico que pudiera requerir entrenamiento especial con relación a su uso apropiado. Por favor siga cualquier norma local o autoridad gubernamental con relación al uso de este dispositivo.

