

CÓMO USAR EL

Kit De Vendaje Oclusivo Para Sellado De Herida H&H



Abra el empaque tirando de una de las pestañas indicadas en el paquete y retire el producto. Tome el producto por la pestaña grande para mantener estéril el producto y siga estas instrucciones para su aplicación.

1



Utilizando la almohadilla incluida, limpie cualquier fluido corporal de la herida del pecho. Sosteniendo el producto desde la pestaña grande, separe el respaldo de plástico transparente de la base pegajosa de hidrogel.

2

Mantenga el Sello para Herida sobre la herida y colóquelo sobre el pecho, centrando las tres válvulas sobre el área de la herida. Usted puede observar y vigilar la herida a través del hidrogel.

3

Sobe hacia afuera el hidrogel con la mano para asegurar un sellado firme contra la piel. Si usted necesita ajustar o mover el sello, use la pestaña grande en un extremo para retirar el sello de la piel.

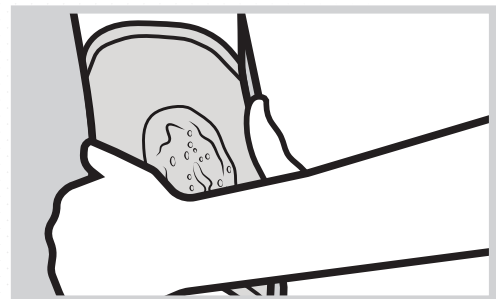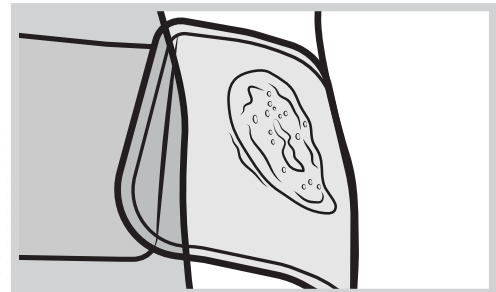

ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA UN USO. NO REUTILIZAR.

Este producto es un dispositivo médico que pudiera requerir entrenamiento especial con relación a su uso apropiado. Por favor siga cualquier norma local o autoridad gubernamental con relación al uso de este dispositivo.