

INSTRUCCIONES DE USO

Protector Ocular H&H



Protector ocular para heridas penetrantes, compuesto de un escudo de aluminio que protege al globo ocular, el cual está cubierto por un disco de hidrogel de 6 pulgadas, que permite cubrir una superficie amplia sin dañar zonas con traumas o quemaduras. Incluye una almohadilla de gasa de 4" x 4" para limpiar la superficie del área de la herida antes de aplicar el protector.

1

Abra el paquete utilizando las zonas marcadas para este fin y retire el producto de su envase.

2

Tome la gasa y limpie cuidadosamente alrededor del área lesionada, retire los fluidos corporales o basura de alrededor del ojo. No limpie el ojo y no coloque la gasa ni ningún otro objeto sobre el ojo.

3

Separe el plástico protector y coloque cuidadosamente el Protector Ocular sobre el ojo lesionado, teniendo cuidado de no comprimir el globo ocular, fíjelo en su posición aplicando el disco de hidrogel sobre la piel. Procure retirar cualquier arruga o doblez en el disco de hidrogel para asegurar un sellado óptimo.

4

Si el disco de hidrogel es demasiado grande para el rostro de la persona lesionada o el mismo pudiera bloquear la nariz o boca, corte las porciones del disco que pudieran causar problemas.

5

Revise frecuentemente el Protector Ocular para asegurarse de que no se haya movido o requiera ser colocado de nuevo.



PRODUCTO SÓLO PARA UN USO, NO REUTILIZAR.

Como todo dispositivo médico, su uso requiere de entrenamiento y utilizarlo en base a los protocolos y normas dispuestas por las autoridades locales

