

## AUTOAPLICACION DEL TORNIQUETE

# SWAT-T™

CON UNA MANO



El torniquete SWAT-T permite su autoaplicación en un brazo herido con una sola mano. Para esto debe seguir las siguientes instrucciones: Tome el torniquete SWAT-T con su brazo disponible y abra el envoltorio con sus dientes, este abrirá fácilmente debido a los múltiples prepicados que posee.




Sujete el extremo de SWAT-T con sus dientes, los cuales cumplirán la función de una “segunda mano” reteniéndolo mientras lo envuelve alrededor de su brazo herido.

El torniquete se deberá colocar entre la herida y su hombro (o sobre la herida si lo utiliza como un vendaje compresivo para sujetar una gasa previamente puesta en la herida). SWAT-T se aplicará directamente sobre la piel si el brazo está expuesto, o sobre la ropa en cuyo caso debe verificar que no existan objetos en bolsillos.




Acerque su boca al brazo herido, manteniendo la extremidad de SWAT-T sujeta con sus dientes y utilizando su brazo sano proceda a envolver con el torniquete su extremidad herida.

Sostenga con sus dientes el extremo de SWAT-T mientras realiza una primera envoltura completa en torno al brazo herido, es decir en todo el perímetro de la extremidad.

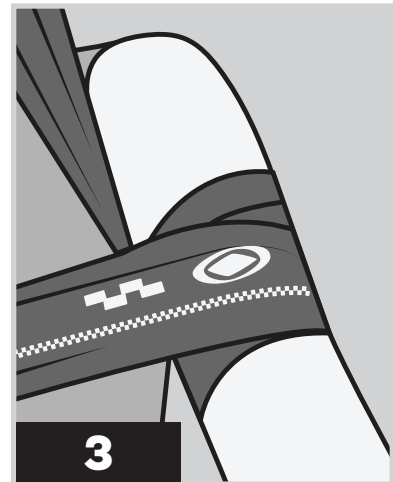

Mantenga el extremo de SWAT-T sujeto con sus dientes y continúe envolviendo la extremidad con el torniquete debiendo este estar estirado y las vueltas estar unas encima de otra (los diamantes dibujados en la banda deben adquirir la forma de cuadrados para asegurar la tensión requerida). Esto permitirá que SWAT-T actúe como torniquete controlando el sangramiento hemorrágico.

## AUTOAPLICACION DEL TORNIQUETE SWAT-T CON UNA MANO

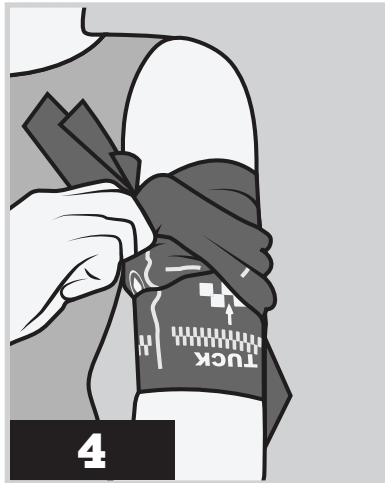

**PRODUCTO SÓLO PARA UN USO, NO REUTILIZAR.**

*Como todo dispositivo médico, su uso requiere de entrenamiento y utilizarlo en base a los protocolos y normas dispuestas por las autoridades locales*

Repita este proceso manteniendo en forma permanente la tensión sobre SWAT-T, luego de varias vueltas podrá soltar la extremidad que sujeta con los dientes.

Al momento de realizar la última vuelta debe "fijar" el extremo final del torniquete con la misma banda (apresarlo con la última vuelta). El torniquete SWAT-T se contraerá sobre sí mismo, lo que lo mantendrá en su posición y además ejercerá presión sobre la extremidad herida controlando el sangramiento.

Toda aplicación de un torniquete o empaque de una herida con gasa y posterior colocación de un vendaje requiere que sea permanente revisado para verificar que este se encuentre trabajando en forma adecuada.

Dimensions: 4.5" x 3" x 0.6"

Weight: 10 oz.

Available in two colors:

Safety Orange and Tactical Black.

MADE IN THE USA



328 McLaws Circle,

Williamsburg, VA 23185

(804) 642-3663 | hhmedcorp.com

Productos de Grado Militar. Probados en Combate.™